



LABORATOIRE
VÉTÉRINAIRE
DÉPARTEMENTAL

Informations relatives à l'envoi d'un échantillon pour recherche d'anticorps antirabiques

TECHNIQUE

- Séroneutralisation rage réalisée selon la technique FAVN test définie dans le Manuel terrestre de l'OIE en cours de validité.
- Délais de réalisation des essais : 15 jours

PRELEVEMENT

- 1/ Réaliser un prélèvement sanguin de l'animal sur tube sec
- 2/ Centrifuger le prélèvement de façon à recueillir le sérum
- 3/ Envoyer au laboratoire au minimum 500µl à 1 ml de sérum
- 4/ Bien protéger le prélèvement en réalisant le colis
- 5/ Pour un envoi de l'étranger, utiliser un transporteur privé type TSE, DHL. Un envoi réfrigéré est fortement conseillé

REMARQUE : *Si le délai entre la date de la prise de sang et la date de réception au laboratoire excède 15 jours, le laboratoire s'autorise le droit de refuser de réaliser l'analyse, sauf sous la demande expresse du prescripteur*

INFORMATIONS A COMMUNIQUER

Une fiche de commémoratifs doit accompagner tout prélèvement arrivant au laboratoire. Devront être mentionnés obligatoirement les coordonnées du propriétaire et du vétérinaire prescripteur, ainsi que diverses informations concernant l'animal.

Afin de permettre un traitement plus rapide des dossiers et d'en simplifier la gestion, il ne nous est possible de traiter que les demandes d'analyses comportant un dossier complet. Pour ce faire, merci de nous faire parvenir tout prélèvement accompagné d'une fiche de commémoratifs dument remplie et signée par le vétérinaire prescripteur.

76, chemin Boudou
CS 50013
31 140 LAUNAGUET
Tel. 05 62 79 94 20/70
Fax 05 62 79 94 30
lvd31@cg31.fr
www.labo-veto-haute-garonne.fr